


Auswahl der richtigen Größe der Manschetten und der Elektrodenposition

Die Manschetten sind in drei Größen erhältlich:
Small, Medium und Large.


1

Messen Sie Ihren Hüftumfang an der breitesten Stelle, wie es hier abgebildet ist.

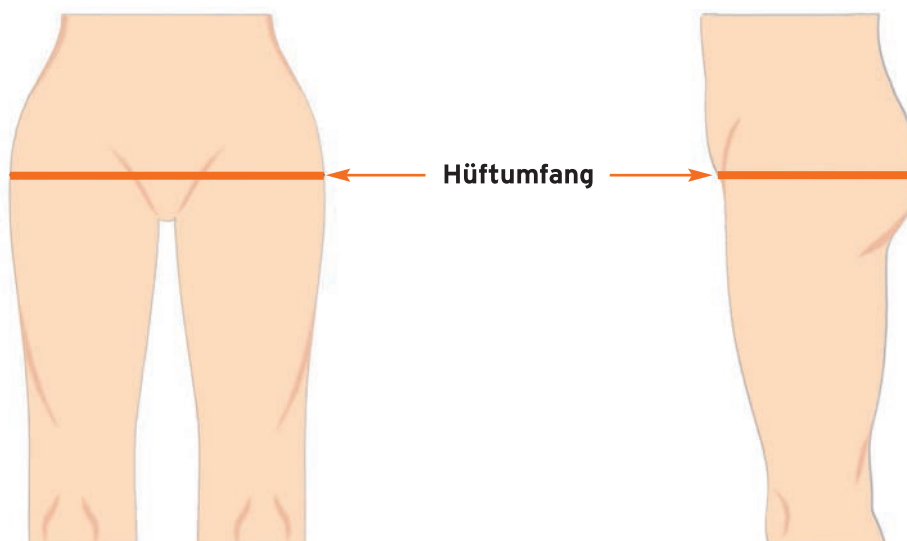

2

Verwenden Sie diese Tabelle zur richtigen Auswahl der Manschettengröße und der Elektrodenposition A oder B.

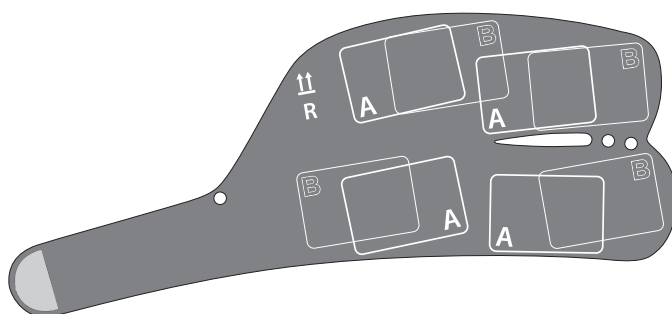

GRÖßENTABELLE

Hüftumfang	Größe	A or B
86.3-97.5cm	S	A
97.6-107.7cm	S	B
107.9-116.6cm	M	A
116.8-121.7cm	M	B
121.9-124.6cm	L	A
124.7-127cm	L	B

Bitte lesen Sie nun die ausführliche Gebrauchsanweisung und die Kurzanleitung. Das Anleitungsvideo finden Sie unter www.neurotech-vital.de

Atlantic Therapeutics GmbH
In Oberwiesen 9
88682 Salem
Telefon +49 7553 590 990-00
Telefax +49 7553 590 990-50
E-Mail info@atlantictherapeutics.de
Web www.atlantictherapeutics.de